

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję używania. Należy zachować instrukcję, aby w razie konieczności móc ją ponownie przeczytać. W przypadku pytań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

junior-angin

SPRAY DO GARDŁA

od 3 roku życia

Jak działa junior-angin Spray do gardła?
Kaszlowi często towarzyszy podrażnienie i/lub stan zapalny gardła, co może wywołać jego nasilenie i doprowadzić do dalszego bólu gardła oraz dyskomfortu.
Spray do gardła jest wyrobem medycznym, który zawiera miód w swoim składzie, łagodzi kaszel i ból gardła. Tworzy w gardle film ochronny, który powleka podrażnioną błonę śluzową i tym samym łagodzi kaszel.

Co należy wiedzieć przed zastosowaniem?
junior-angin Spray do gardła nie może być stosowany w następujących przypadkach:

- jeśli Ty lub Twoje dziecko wykazujecie nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu,
- jeśli kaszel u Ciebie lub u Twojego dziecka jest spowodowany przewlekłym zapaleniem oskrzeli, astmą, rozedmą płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) lub jeśli podczas kaszlu produkowane są duże ilości śluzu,
- jeśli przewlekły lub nawracający kaszel u Ciebie lub u Twojego dziecka jest spowodowany zgagą lub rozstrojem żołądka.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

- Ty lub Twoje dziecko cierpiecie na cukrzycę (3 rozpylenia odpowiadają około 0,05 wymiennika węglowodanowego),
- kaszel nasila się podczas leczenia,
- występuje uporczywy kaszel z obfitą produkcją śluzu i/lub wysoka gorączka,
- występuje przedłużająca się chrypka lub problemy z głosem,
- Ty lub Twoje dziecko macie poważne trudności z połykaniem,
- Ty lub Twoje dziecko zauważyście nieprzyjemny efekt po użyciu sprayu,
- spray przypadkowo dostanie się do oczu.


Kto może stosować junior-angin Spray do gardła?
Spray może być stosowany przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 3 roku życia. W przypadku dzieci spray należy zawsze podawać pod nadzorem osoby dorosłej.
Spray jest wyrobem medycznym, a nie zabawką.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu podczas ciąży i karmienia piersią nie jest znane. Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.


Stosowanie junior-angin Spray do gardła z innymi metodami leczenia lub produktami:
Nie są znane interakcje z innymi produktami na kaszel, jeśli są one stosowane zgodnie z instrukcją używania. Zaleca się jednak konsultację z farmaceutą lub lekarzem przed połączeniem sprayu z innymi metodami leczenia.

Jak stosować junior-angin Spray do gardła?
Mocno wstrząsnąć przed użyciem.


– Należy trzymać element kształtem przypominający uszy słonia tak, aby mniejsza część uszu była skierowana w dół. Nałożyć pierścień na szyjkę butelki i docisnąć do momentu, gdy nie będzie widoczna żadna szczelina.

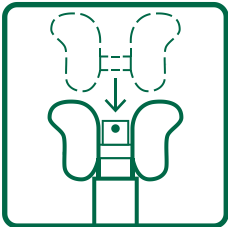

– Wcisnąć dyszę do głowicy rozpylającej aż do usłyszenia kliknięcia.

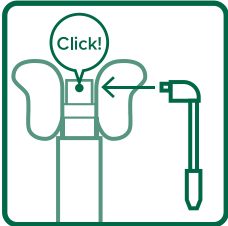

– Obrócić dyszę poziomo tak, aby była ułożona w pozycji równoległej do podłoża i usunąć przezroczystą nasadkę z końcówki dyszy.

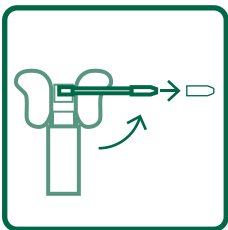

– Spryskać bezpośrednio tylną część gardła. Spryskiwać gardło 2 do 3 razy co 3 godziny lub w zależności od potrzeb. Po użyciu z powrotem nałożyć nasadkę na dyszę.



LOW-RES PDF - NOT FOR PRINT

Bezeichnung: PB junior-angin Spray	Format: 150 x 339 mm	Lackaussparung:	Verwendete Schriften:	Datum: 11.11.2024	Version: 05
Inhalt: -	Druckfarben:	I) -	Helvetica Neue LT Pro	SB: JEI	Seite: 1 / 2
Artikel-Nr.: 9905878	1) ■ PANTONE 342 C	II) -		PR: SH	
Material-Nr.: 26002246	2)	III) -		EAN geprüft und lesbar:	
Druck-Kennz.: 01P0924	3)	IV) -		☐ Ja ☐ Nein	
Laetus-Code: 447	4)	V) -		Freigabe:	
AG-Nr.: -	5)	Lack: ☐			
EAN-Code: -	6)	Lackfrei: ☐	Mindestschriftgröße: 9 pt		
PZN-Code: -	7)	Effekt-Lack: ☐	(1,6 mm x-Höhe)		
Land: PL		Prägung: ☐	Mindestzeilenabst.: 3,3 mm		
Zeichn.-Nr.: -					

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem medycznym, produktami wadliwymi lub podrobionymi należy zgłaszać dystrybutorowi, producentowi lub właściwemu organowi. W ten sposób wspierasz nas w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności produktów.

Jak należy przechowywać junior-angin Spray do gardła?



Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.



Spray należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie sprayu i opakowaniu zewnętrznym.



Po pierwszym otwarciu okres przydatności sprayu wynosi 6 miesięcy. Nie należy przekraczać daty ważności.

Skład: Polysac-Active® (miód UE), woda, chlorek sodu, sorbinian potasu, ekstrakt z chrząstnicy kędzierzawej, aromat wiśniowy, kwas cytrynowy.



Zawartość opakowania: butelka 20 ml, głowica rozpylająca z dyszą, element „uszy słonia” i instrukcja używania



Medical Brands Developments B.V.
Weesperstraat 114
1112 AP Diemen, Nederlandy



M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska

Podmiot Grupy



Ostatnia aktualizacja instrukcji używania: październik 2024.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Okres przydatności po pierwszym otwarciu



Wyrób medyczny



Data ważności



Oznaczenie partii



Należy przestrzegać instrukcji używania.



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Zakres temperatur 15-25°C



Producent



Dystrybutor



Ostrożnie

20TSEE.KF.PL.I.00 77267121
26002246 01P0924 447

LOW-RES PDF - NOT FOR PRINT

Bezeichnung: PB junior-angin Spray

Inhalt: -

Artikel-Nr.: 9905878

Material-Nr.: 26002246

Druck-Kennz.: 01P0924

Laetus-Code: 447

AG-Nr.: -

EAN-Code: -

PZN-Code: -

Land: PL

Zeichn.-Nr.: -

Format: 150 x 339 mm

Druckfarben:

1) PANTONE 342 C

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Lackaussparung:

I) -

II) -

III) -

IV) -

V) -

Lack: ☐

Lackfrei: ☐

Effekt-Lack: ☐

Prägung: ☐

Verwendete Schriften:

Helvetica Neue LT Pro

Mindestschriftgröße: 9 pt

(1,6 mm x-Höhe)

Mindestzeilenabst.: 3,3 mm

Datum: 11.11.2024

Version: 05

SB: JEI

PR: SH

Seite: 2 / 2

EAN geprüft und lesbar:

☐ Ja

☐ Nein

Freigabe: